


Návod na použití – Termolahev, objem 2 l

1. Připravte teplou vodu o teplotě přibližně 50°C. Nepoužívejte vroucí vodu nebo vodu, která může způsobit popáleniny. Odšroubujte uzávěr a pomalu naplňte termofor horkou vodou až do $\frac{3}{4}$ jeho objemu. Při plnění držte termofor s horkou vodou za krkem ve svislé poloze.
2. Zbavte se přebytečného vzduchu pomalým nakláněním láhve s horkou vodou, do té doby, dokud není vidět voda v hrdle láhve. Pro větší pohodlí můžete láhev s horkou vodou položit na rovný povrch.
3. Opatrně zašroubujte zátku, lahev otočte zátkou dolů a zkontrolujte jeho těsnost. Poté nasadte na lahev potah. Výrobek je vyroben z vysoce kvalitní gumy, která zaručí vynikající tepelné vlastnosti, zatímco potah dodá tělu příjemný komfort při používání.

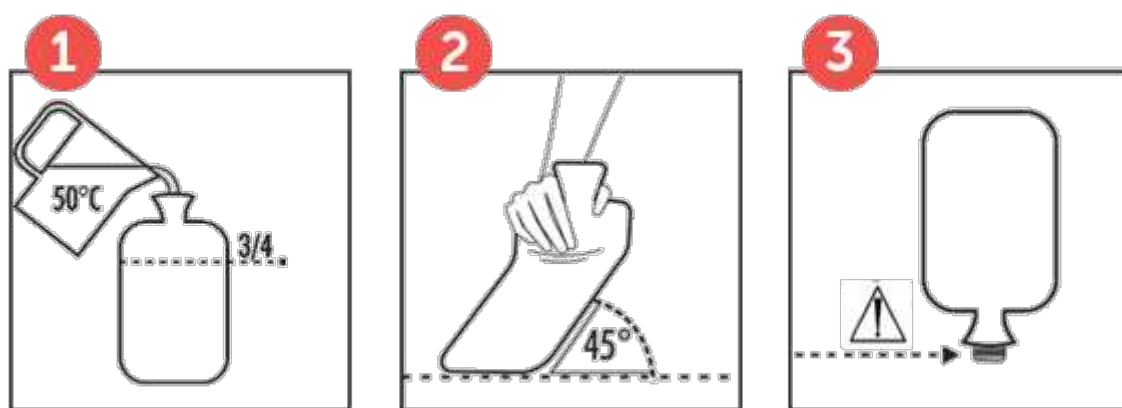

Termofor je zdravotnický prostředek. Potah je vyroben z pravé ovčí vlny nebo polyesteru. Pokud je potah znečištěn, perte pouze ručně pomocí mýdla a vody při teplotě do 30°C. Čas od času opláchněte gumovou láhev s teplou vodou mýdlem a vodou. Nepoužívejte dezinfekční prostředky.

Termofor mohou děti používat vždy pod dohledem dospělého. Zabraňte dlouhému přímému kontaktu s pokožkou láhve s teplou vodou bez obalu. Lahev nesmí být nikdy plná vody ze 100%!

Nesedejte termofor, nepokládejte na něj těžké předměty. Nevkládejte žádné předměty do láhve s horkou vodou ani na ni. Před použitím zkontrolujte, zda není produkt opotřebený nebo mechanicky poškozený. V případě poškození jedné z částí zlikvidujte celý produkt. Zlikvidujte jej v souladu s platnými zákony.

Poznámka: Použití horké vody při teplotě nad 70°C zkracuje životnost láhve na horkou vodu, může ji poškodit a následně vést k popáleninám. Neohřívejte v mikrovlnné troubě. Uchovejte návod k použití.

Vyrobena z vysoce kvalitního přírodního kaučuku s drážkovanými stěnami. Používá se k terapeutickým a profylaktickým účelům k zahřátí těla a zmírnění bolesti. Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a postupujte podle doporučení.